

MUND-NASEN-MASKE

# NÄHANLEITUNG

MITEINANDER – FÜREINANDER



Diese Mund- und Nasen-Maske wird komplett selbst hergestellt, sie ist weder geprüft, noch zertifiziert.

Herstellung und Benutzung sind nach sorgfältiger Abwägung eigenverantwortlich.

Die Mund- und Nasen-Maske dient dem Zweck, die Verbreitung von Tröpfchen durch den Träger zu reduzieren. Das Tragen der Mund- und Nasen-Maske kann die Übertragungswege des Corona-Virus reduzieren.



## AKTUELLE INFORMATIONEN

Stets aktuelle Informationen für Sie als Mitglied der Stiftungsfamilie finden Sie auf unserer Website.

[www.stiftungsfamilie.de/corona-krise](http://www.stiftungsfamilie.de/corona-krise)

[www.stiftungsfamilie.de](http://www.stiftungsfamilie.de)



**STIFTUNGSFAMILIE**  
BSW & EWH


## FOLGENDE MATERIALIEN WERDEN BENÖTIGT:

- zwei 90 cm lange und 3 cm breite Stoffstreifen (kochfeste Baumwolle)
- zwei 17cm lange und 3 cm breite Stoffstreifen (kochfeste Baumwolle)
- einen 15 cm langen Draht (Basteldraht, Pfeifenreiniger, etc.)
- 17 x 34 cm großes Stofftuch aus atmungsdurchlässigem kochfestem Baumwollstoff


## PRÜFUNG DER ATMUNGSDURCHLÄSSIGKEIT:

- Tuch doppelt nehmen
- dicht um Mund und Nase schließen
- Ein- und Ausatmen

Ist das Ein- und Ausatmen ohne größeren Atemwiderstand möglich, ist das Material als Mundschutz geeignet!

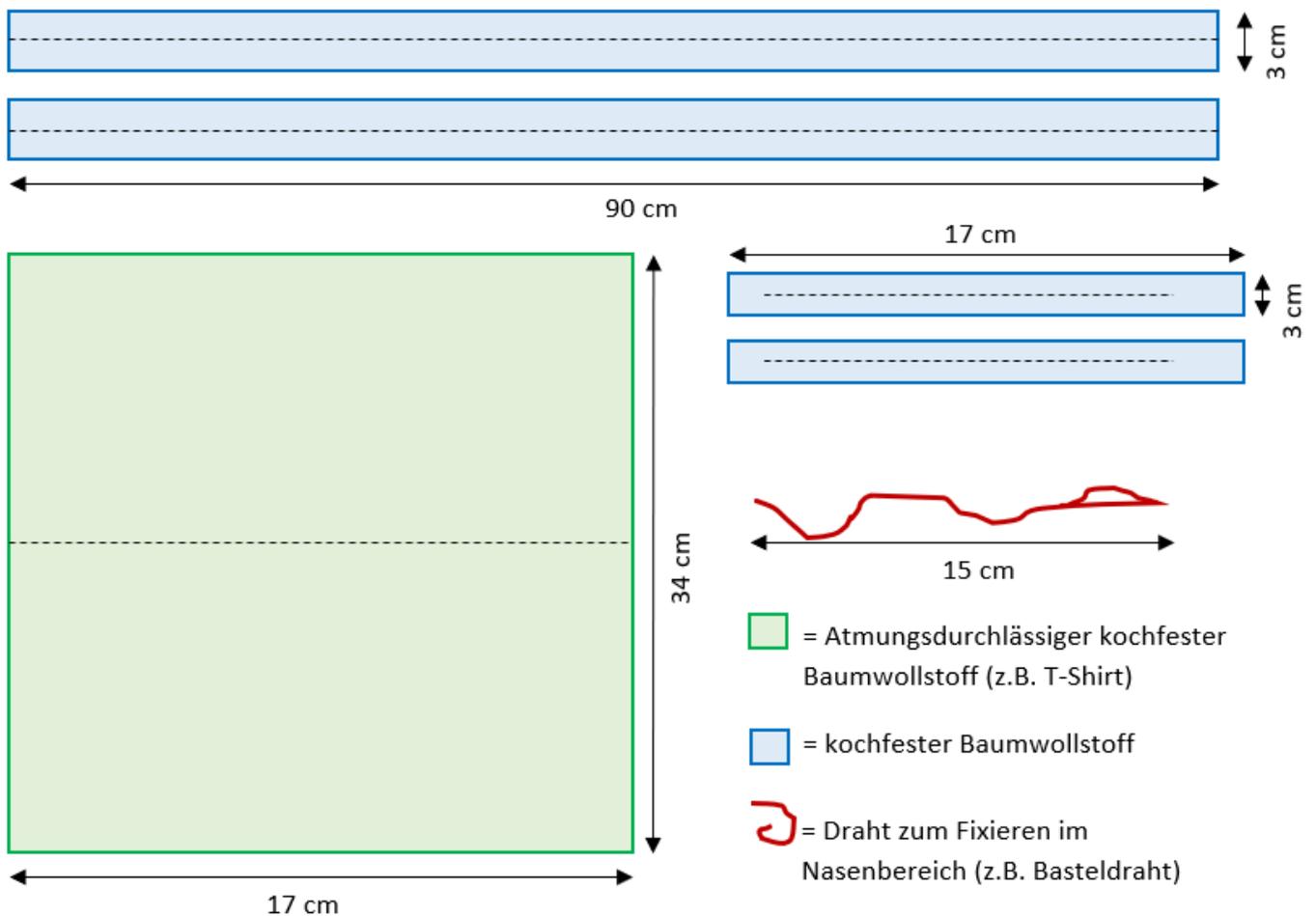

1. 17 x 34 cm Stofftuch anzeichnen und ausschneiden
2. Stofftuch zur Hälfte falten und gefaltet bügeln
3. In das gefaltete Stofftuch drei gleichmäßig verteilte Falten Bügeln (Faltentiefe 1,3 cm)
4. Zwei 90 x 3 cm Streifen (Kopfbänder) und zwei 17 x 3 cm Streifen (Kantenverstärkung) aus Baumwolle ausschneiden. Evtl. Ränder versäubern
5. Alle Streifen der Länge nach zur Hälfte falten und gefaltet bügeln (Neue Streifenmaße: 90 x 1,5 cm u. 17 x 1,5 cm)
6. Stofftuch oben und unten in die Kantenverstärkungen einlegen

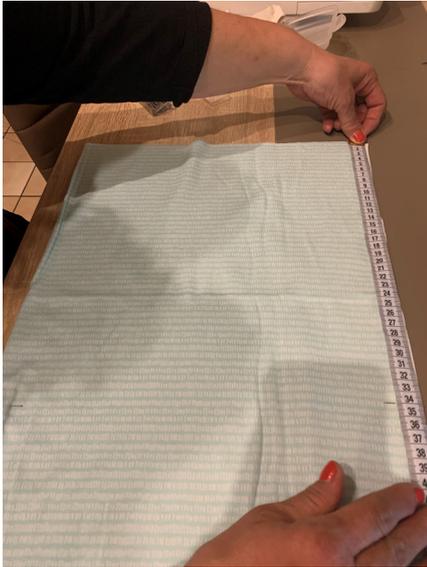

7. Am Oberteil Draht in die Kantenverstärkung einlegen

**Hinweis/Tipp:** Anstatt eines Drahtes oder Pfeifenputzer können auch die kleinen Drähte der Gefrierbeutel verwendet werden, davon braucht man dann 2.

8. Stofftuch einfassen, Kantenverstärkung mit Nadeln feststecken und vernähen
9. Die eingebügelten Falten des Stofftuchs zusammenlegen und mittig auf beiden Seiten in die Kopfbänder einlegen. Kopfbänder feststecken und vernähen.

**Hinweis/Tipp:** Beim Zusammennähen der Bänder würde ich empfehlen mit dem Zickzackstich der Nähmaschine zu nähen, da die Bänder dann gleichzeitig versäubert werden.





### **3. PFLEGE UND REINIGUNG**

Trocken lagern, vor der Benutzung waschen. Nach der Benutzung die Mund- und Nasen-Maske vorsichtig ausziehen, nach der Benutzung nur an den Bändern anfassen und die Hände gründlich waschen.

Gebrauchte Mund- und Nasen-Masken sollten nach jeder Benutzung in der Waschmaschine bei 90 Grad Celsius oder in einem Topf mit Wasser ausgekocht werden.

### **4. HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Wirksamkeit, die Herstellung oder die sachgerechte Verwendung der Mund- und Nasen-Masken übernehmen. Jeglicher Schadensersatzanspruch gegenüber der Stiftungsfamilie BSW & EWH wegen Verletzung des Lebens, Körpers oder der Gesundheit – unabhängig, ob vom Verwender oder dem jeweiligen Gegenüber – ist ausgeschlossen.

Die Herstellung und Verwendung der Mund- und Nasen-Masken erfolgen auf eigene Gefahr.

Wir weisen darauf hin, dass auf jeden Fall die Hygienevorschriften des Robert-Koch-Instituts zu beachten sind.

